
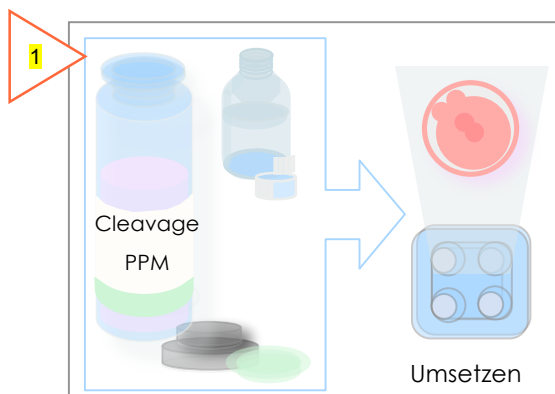
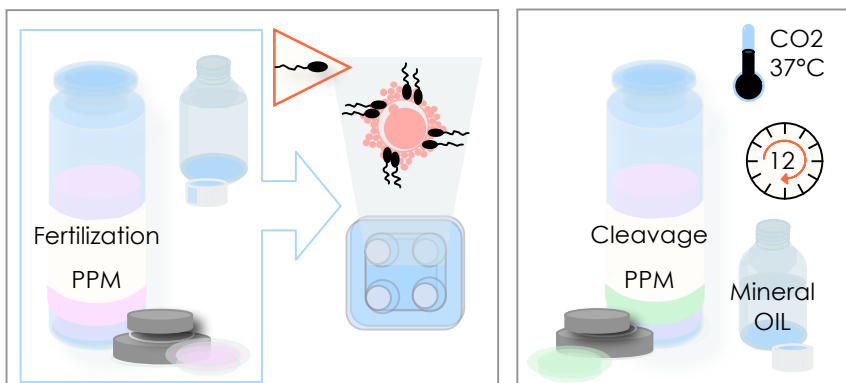
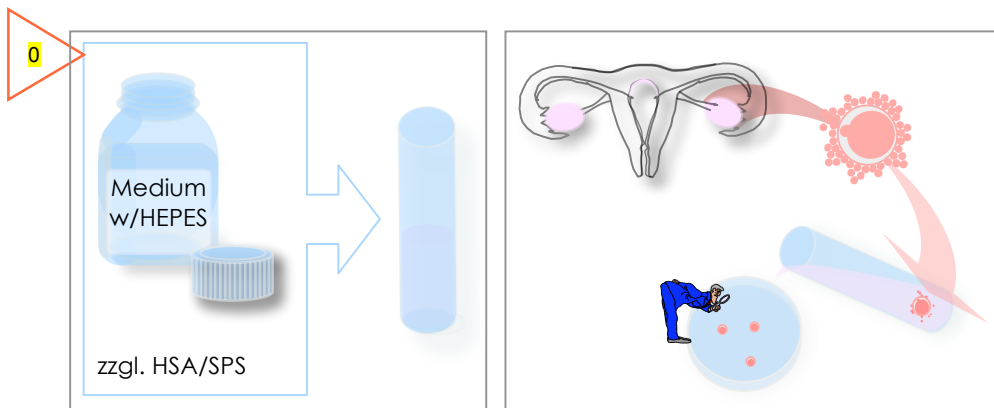








QA Protein Plus Sequential IVF - Medien

BILDBESCHREIBUNG ZUM MEDIUMGEBRAUCH UND PROZEDERE IM RAHMEN EINER IVF

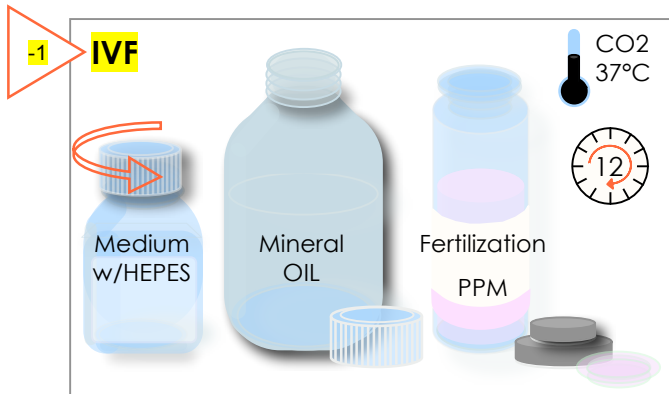

QA Protein Plus Sequential IVF - Medien

BILDBESCHREIBUNG ZUM MEDIUMGEBRAUCH UND PROZEDERE IM RAHMEN EINER IVF

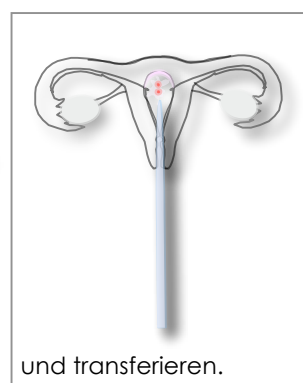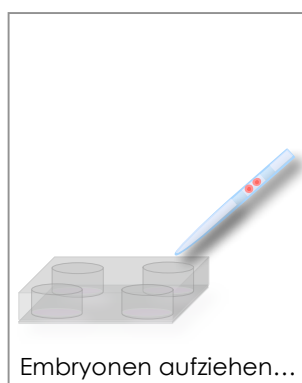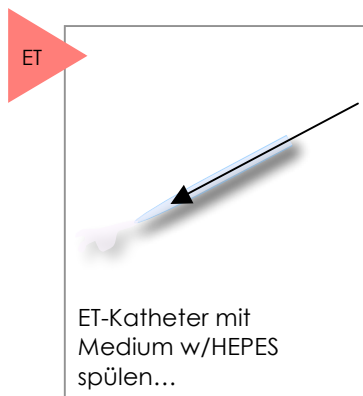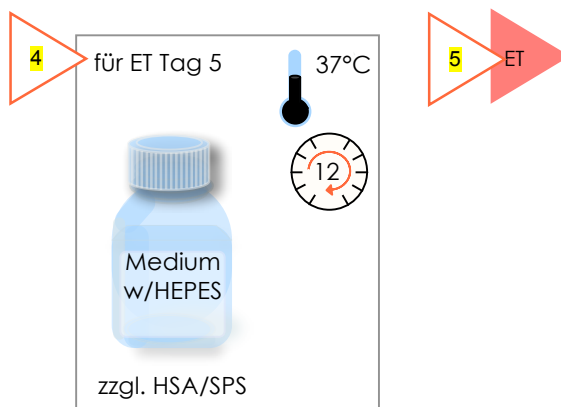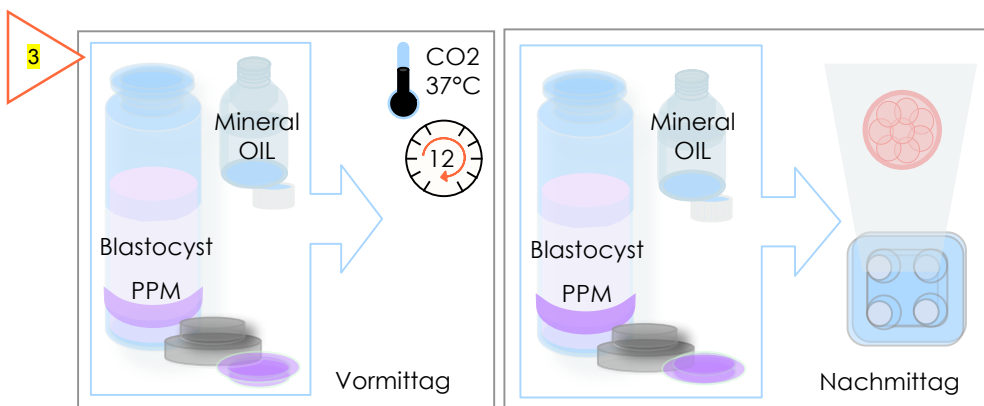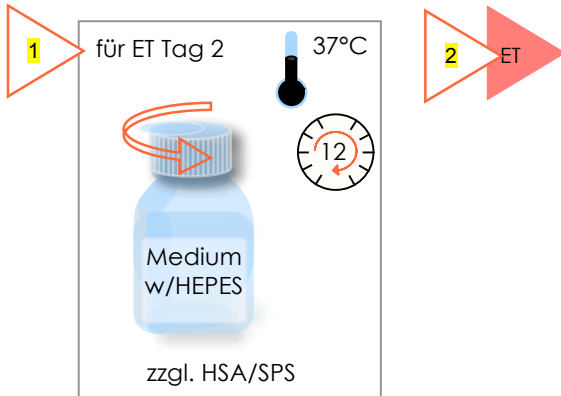

Quinn's Advantage PROTEIN PLUS IVF - Medien

MATERIALLISTE

Benötigte SAGE – Medien	Art-Nummer
QA Fertilization (HTF) Protein Plus Medium	ART-1520
QA Cleavage Protein Plus Medium	ART-1526
QA Blastocyst Protein Plus Medium	ART-1529
QA Medium mit HEPES	ART-1023
Oil for Tissue Culture	ART-4008
PVP 7% - Ready for use	ART-4005-A
Hyaluronidase - Ready for use	ART-4007-A
Human Serum Albumin oder SPS	ART-3003 oder ART-3011
Quinn's Sperm Washing Medium	ART-1006
Dichtegradient PureCeption 40%	ART-2040
Dichtegradient PureCeption 80%	ART-2080
ICSI-Injektionsipetten (The Pipette Company)	LISR
ICSI-Halterpipetten (The Pipette Company)	LHS
Punktionsnadeln / Punktionsysteme (Laboratoire C.C.D.)	
Embryotransferkatheter (Laboratoire C.C.D.)	