

Amniozentese - Nadel



BESCHREIBUNG

Amniozentese-Nadel zur transabdominalen Fruchtwasserpunktion.

Die Amniozentese-Nadel mit einem \varnothing von 0,9 mm (20G) ist in drei Längen lieferbar: 100, 120 und 150 mm. Distal mit doppelt geschliffener, kurzen Spitze und nachfolgend 3 echogenen Flächen versehen und Proximal mit einem transparenten Luer-Lock-Anschluss versehen. Ausgestattet mit einem selbst blockierenden Mandrin.

GEBRAUCHSEMPFEHLUNG

Amniozentese:

Führen Sie die allgemein gebräuchliche Desinfektionstechnik für chirurgische Eingriffe durch.

Überprüfen Sie, dass der Mandrin innerhalb der Nadel fest blockiert ist.

Setzen Sie die Nadel senkrecht zur Haut an und folgen Sie unter Ultraschall-Führung einer im voraus sonographisch festgelegten Strecke, bis zu einer Zyste amniotischer Flüssigkeit.

Entfernen Sie den Mandrin und befestigen Sie eine 20 ml Glas-Spritze.

Aspirieren Sie das Fruchtwasser, indem Sie vorsichtig einen moderaten, negativen Druck erzeugen.

Wenn Sie ausreichend Flüssigkeit (25 bis 30 ml) gesammelt haben, führen Sie den Mandrin wieder ein und entfernen die Amniozentese-Nadel

Übertragen Sie die amniotische Flüssigkeit in trockene, sterile Röhrchen und halten Sie diese während des Transports auf 37°C erwärmt.

1110600	Amniozentese Nadel, 120 mm		
1119615	Amniozentese Nadel, 150 mm	ESV	VE à 25 Stück
1140701	Amniozentese Nadel, 100 mm		
