

Duo - Brush



BESCHREIBUNG

Zervikal-Abstrichbürste für den Abstrich der Endozervix, des Übergangsbereichs und der Exozervix.

DUO-BRUSH ermöglicht mit nur einer Drehung mit seiner vertikalen Abstrichbürste einen atraumatischen Zugang zum Übergangsbereich und mit der horizontalen Abstrichbürste den umfassenden Abstrich der Oberfläche der Exozervix.

DUO-BRUSH verbessert die Qualität der gewonnenen Probe: 99% der Abstriche sind auswertbar.

GEBRAUCHSEMPFEHLUNG

DUO-BRUSH wird vorsichtig mit der axialen Bürste in die Endozervix eingeführt.

Mit leichtem Druck wird die laterale Bürste an die Exozervix gedrückt.

Stellen Sie sicher, dass die Bürstchen der DUO-BRUSH einen guten Kontakt mit der Endo- bzw. Exozervix haben.

Durch einmaliges Drehen der DUO-BRUSH wird die Probe entnommen. Mehrmaliges Drehen der Bürstchen kann zu Blutungen führen, ohne die Qualität der Probe zu erhöhen.

Die mit DUO-BRUSH gewonnene Probe kann auf einen einzelnen Glasträger gestrichen werden (conventional swab) oder oberhalb der Abstrichbürste abgebrochen werden und in ein Transportmedium gegeben werden (single layer swab).

GEGENANZEIGEN:

Nicht für Probenentnahmen des Endometriums geeignet

Schwangerschaft ab der 10 SSW

1112101	DUO-BRUSH steril	ESV	VE à 25 Stück
1112201	DUO-BRUSH unsteril	ESV	VE à 50 Stück