

# Endobrush



## BESCHREIBUNG

Endobrush ermöglicht ohne Zug oder Dehnung der Zervix, leicht und schmerzfrei, den Abstrich und die bakteriologische Probenentnahme des Endometriums.

Endobrush besteht aus einer Hülle mit drei Markierungen bei 4, 7 und 10 cm am distalen Ende. In der Hülle läuft ein Mandrin an dessen Ende eine Abstrichbürste montiert ist die wiederum mit einer Kappe versehen ist, deren Durchmesser identisch mit dem der Hülle ist. Mit dem Mandrin kann die Abstrichbürste, zur Sicherung der entnommenen Probe, in die Hülle eingeschoben werden. Die Kappe legt sich dann wie ein Deckel auf die Hülle und sichert die Probe zusätzlich.

Endobrush ist in zwei Ausführungen lieferbar:

### **Endobrush Standard**

Die Länge der Hülle beträgt 23,5 cm mit einem Durchmesser von 3,5 mm.

Die Abstrichbürste ist rautenförmig mit einer Länge von 2 cm und einem Durchmesser von 4 mm an den Enden und 15 mm an seiner breitesten Stelle im Mittelteil.

### **Endobrush Small**

Die Länge der Hülle beträgt 20 cm mit einem Durchmesser von 2,2 mm.

Die schmale Abstrichbürste hat eine Länge von 2 cm mit einem Durchmesser von 5 mm.

## Endobrush



### GEBRAUCHSEMPFEHLUNG

Platzieren Sie ein Spekulum und reinigen Sie die Zervix.

Ziehen Sie die Abstrichbürste vollständig in die Hülle ein, so dass die Verschlusskappe das distale Ende der Hülle abdeckt und führen Sie dann die Endobrush ein, bis die Verschlusskappe den Fundus des Uterus erreicht.

Legen Sie die Abstrichbürste frei durch zurückziehen der Hülle bis zum Anschlag.

Zur Probenentnahme wird der Mandrin ein- bis zweimal von links nach rechts und von rechts nach links gedreht.

Wichtig: vor Entfernung der Endobrush schieben Sie, um die gewonnene Probe zu sichern, die Hülle wieder über die Abstrichbürste.

**Zytologische Untersuchung der Probenentnahme:** Tragen Sie die Probe auf einen Objektträger und fixieren Sie diese.

**Bakteriologische Untersuchung der Probenentnahme:** Das gewonnene endometrische Material wird in ein dafür geeignetes Medium gegeben.

Beachte: Bei Frauen in der postmenopausalen Phase kann eine Stenosis der Zervix die Probenentnahme verhindern.

**GEGENANZEIGEN:** Genitalinfektionen, Schwangerschaft

1113000	Endobrush - Standard	ESV	VE à 25 Stück
111300M	Endobrush - Small		