


# Endocyte

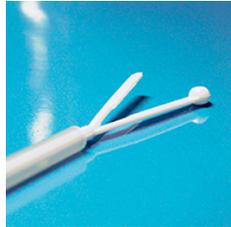

## BESCHREIBUNG

Steriles Einmalinstrument für den zytologischen Abstrich des Endometriums oder der Endozervix im Rahmen einer Krebsvorsorgeuntersuchung.

Ermöglicht eine einfache, für die Patientin schmerzfreie Durchführung des Abstrichs.

Endocyte besteht aus einer transparenten Hülle aus Polypropylen mit einer Länge von 16 cm und einem Durchmesser von 3,2 mm. Distal versehen mit drei Längenmarkierungen bei 4, 7 und 10 cm.

In der Hülle befindet sich ein 21,6 cm langer Mandrin aus Polypropylen, der distal V-förmig in zwei flexible Plättchen geteilt ist. Ein Plättchen endet in einer atraumatischen Kugel mit einem Durchmesser von 3,2 mm. Proximal ist der Mandrin mit zwei seitlichen Ausziehbegrenzungen ausgestattet.

## Endocyte



### GEBRAUCHSEMPFEHLUNG

#### **Zytologische Probenentnahme des Endometriums:**

Platzieren Sie ein Spekulum und reinigen Sie die Zervix.

Durch Ziehen am proximalen Ende des Mandrins werden die Plättchen in die Katheterhülle hineingeschoben, dabei legt sich die Kugel des einen Plättchens schützend über das distale Ende. Sie können nun die Endocyte durch den Muttermund einführen.

Sobald die Kugel der Endocyte den Fundus des Uterus erreicht, ziehen Sie die transparente Hülle bis zum Ausziehstopp zurück und legen so die Probenplättchen frei zur Probenentnahme.

Die Probenentnahme erfolgt durch ein- bis zweimaliges Drehen des Mandrins von rechts nach links und von links nach rechts.

Bevor die Endocyte entfernt wird, ziehen Sie die Hülle über die Probenplättchen, so wird die gewonnene Probe vor Verunreinigungen geschützt.

Um zu vermeiden, dass es durch den Kontakt der Kugel mit der Zervix zu einem falschen, positiven Ergebnis kommt, desinfizieren Sie die Kugel oder schneiden Sie diese ab. Geben Sie anschließend die Plättchen wieder frei und streichen Sie die Probe auf einen Objektträger und fixieren diese sofort.

#### **Zytologische Probenentnahme der Endozervix:**

Die Probenentnahme der Endozervix erfolgt identisch wie oben im Endometrium beschrieben, nur auf Höhe der Endozervix.

---

|         |          |     |               |
|---------|----------|-----|---------------|
| 1102000 | Endocyte | ESV | VE à 25 Stück |
|---------|----------|-----|---------------|

---