


Nadel für Zervix-Anästhesie

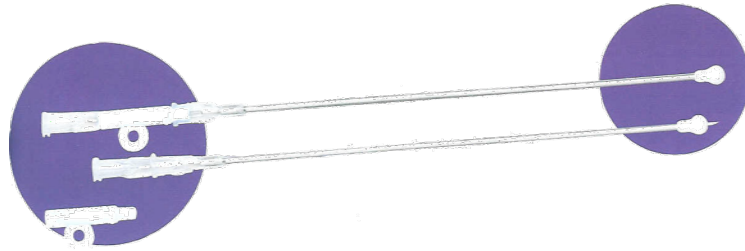

BESCHREIBUNG

Nadel für eine präzise und sichere Zervix – Anästhesie. Dank der birnenförmigen Kunststoffkappe am distalen Ende der Einführungshilfe besteht keine Verletzungsgefahr!

1. Führungshilfe: 165 mm lang aus Edelstahl.

Distal versehen mit einer birnenförmigen Kunststoffkappe und proximal mit einem Luer-Lock-Anschluss.

2. Nadel: 181 mm lang aus Edelstahl.

Die Nadel mit doppelt geschliffener Spitze läuft durch die Führungshilfe und ist proximal mit einem Luer-Lock-Anschluss versehen.

3. Abstandhalter: Ein mit einem durchgehenden Spalt versehenem Röhrchen (offen) mit einer Halterung aus weißem Kunststoff. Es ist auf dem Luer-Lock-Anschluss der Führungshilfe aufgesteckt und kann durch seinen Spalt leicht entfernt werden.



Ist der Abstandhalter entfernt und die Nadel vollständig in die Führungshilfe eingeschoben, ragt die Spitze der Nadel exakt 4 mm aus dem birnenförmigen Ende der Führungshilfe hinaus, wodurch die genau kontrollierte Einspritztiefe von 4 mm gewährt ist.

Nadel für Zervix-Anästhesie



GEBRAUCHSEMPFEHLUNG

Nach Reinigung der Zervix wird die Führungshilfe mit innen liegender Nadel und Abstandhalter in die Vagina eingeführt, wobei die weiße Kunststoffkappe in die seitliche Tasche der Zervix (6 bis 9 Uhr) positioniert wird.

Abstandhalter wie folgt entfernen:

- Abstandhalter aus dem Luer-Lock-Anschluss der Führungshilfe ziehen
- die Nadel aus dem Abstandhalter ziehen
- den Abstandhalter über den Spalt von der Nadel entfernen

Die Nadel wird nun bis zum Anschlag in die Führungshilfe eingeführt. Die Spitze der Nadel sticht genau 4 mm tief in die Zervix ein wo nun die Injektion erfolgen kann.

01.910	Nadel für Zervix – Anästhesie	ESV	VE à 5 Stück
--------	-------------------------------	-----	--------------