


Scrinet

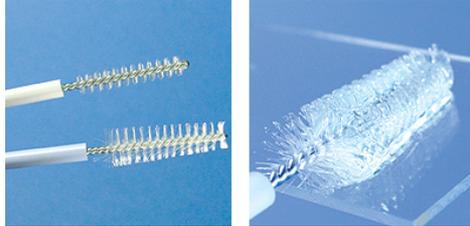

BESCHREIBUNG

Diese Bürste ist ideal für Abstriche der Endozervix im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung zur Erkennung einer Krebserkrankung. Scrinet ermöglicht in jedem Fall einen atraumatischen Zutritt zur Entnahmestelle und die reichhaltige Ausbeute endozervikalen Abstrichmaterials.

Scrinet besteht aus einer zylinderförmigen 2 cm langen Abstrichbürste, die auf einem 18 cm langem Stab montiert ist. Die Abstrichbürste ist in zwei Durchmessern lieferbar:

Ø 5,5 mm (blaues Stäbchen) und Ø 3 mm (weißes Stäbchen)

Beide Abstrichbürsten sind in drei Verpackungseinheiten lieferbar:

- Einzel, steril verpackt (insgesamt 50 Stück)
- 10 Scrinet steril verpackt (insgesamt 250 Stück)
- Unsteril (250 Stück)

GEBRAUCHSEMPFEHLUNG

Platzieren Sie ein Spekulum und führen Sie die Scrinet-Abstrichbürste in den Zervikalkanal ein.

Eine Umdrehung der Scrinet-Bürste reicht für die Probenentnahme.

Ziehen Sie die Abstrichbürste ohne Drehbewegung zurück.

Eine einzige Drehung in gleicher Richtung wie bei der Probenentnahme reicht aus, um das gewonnene Abstrichmaterial auf einen Objektträger zu streichen.

Fixieren Sie die Probe sofort nach der Entnahme.

1107030	Scrinet	Ø 3 mm	ESV	VE à 50 Stück
1107055	Scrinet	Ø 5,5 mm		
1108030	Scrinet	Ø 3 mm	10 SV	VE à 25 x 10 Stück
1108055	Scrinet	Ø 5,5 mm		
1107530	Scrinet	Ø 3 mm	US	VE à 250 Stück
1107555	Scrinet	Ø 5,5 mm		