


Scrinet „secable“

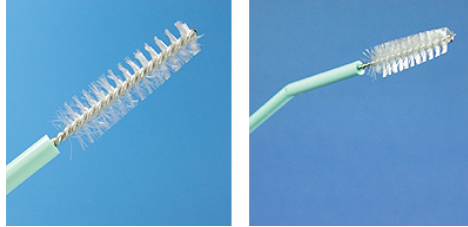

BESCHREIBUNG

Scrinet „secable“ ist ideal für Abstriche zur bakteriologischen Diagnostik der Endozervix (Chlamydiae, Mycoplasmen...).

Dank einer Bruchstelle am oberen Teil des 18 cm langen Stäbchens kann die auf diesem Stäbchen montierte 2 cm lange Abstrichbürste leicht abgetrennt werden. Die Abstrichbürste hat einen Durchmesser von 5,5 cm.

Scrinet „secable“ ermöglicht in jedem Fall einen atraumatischen Zutritt zur Entnahmestelle und die reichhaltige Ausbeute von Abstrichmaterial der Endozervix.

GEBRAUCHSEMPFEHLUNG

Platzieren Sie ein Spekulum und führen Sie die Scrinet-Abstrichbürste in den Zervikalkanal ein.

Zur Gewinnung der Probe wird die Abstrichbürste mehrmals mit Nachdruck in eine Richtung gedreht.

Ziehen Sie die Abstrichbürste ohne Drehbewegung zurück.

Schneiden Sie Scrinet „sécable“ an der dafür vorgesehenen Stelle ab und geben Sie das Abstrichbürstchen in ein entsprechendes Transportmedium.

1108S55	Scrinet Ø 5,5 mm „secable“	Je 2 Bürsten SV	VE à 25 x 2 Stück
---------	----------------------------	-----------------	-------------------