


Umbicut – Nabelschnur Klemmschere

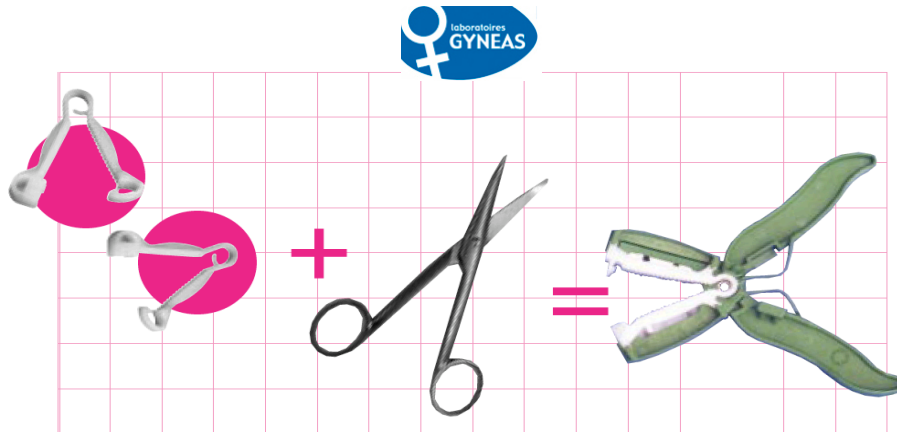

BESCHREIBUNG

Die UMBICUT – Schere ist Nabelschnurschere und Nabelschnurklemmen in einem!

Gebrauchsfertig, schneidet und klemmt die Umbicut-Schere mit einer sauberen und schnellen Geste die Nabelschnur ab! Der Schnitt erfolgt zwischen den beiden V-förmigen Nabelschnurklemmen. Die Abtrennung der Nabelschnur dauert eine Sekunde und erfolgt ohne Blutspritzer!

Die UMBICUT-Schere bietet sich auch an, für die schnelle Durchtrennung der Nabelschnur bei einem Kaiserschnitt.

GEBRAUCHSEMPFEHLUNG

Die Nabelschnur so tief wie möglich in den V-Ausschnitt der UMBICUT-Klemmschere setzen, um ein sicheres Schließen der Nabelschnurklemmen zu gewährleisten.

Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen UMBICUT und dem Bauch des Säuglings mindestens 4 cm beträgt.

Die UMBICUT - Klemmschere mit einer kräftigen, gleichmäßigen Bewegung zusammendrücken bis das Schließen der Nabelschnurklemmen mit einem deutlichen „Klick“ zu hören ist.

Überprüfen Sie die korrekte Position und den guten Verschluss der Nabelschnurklemmen.

Für die Entnahme von Nabelschnurblut können Sie die UMBICUT - Klemmschere wie eine normale Schere wieder verwenden. Einfach das distale Ende der Nabelschnur mit der Nabelschnurklemme abschneiden und anschließend das Blut aus der Nabelschnur wie gewohnt entnehmen.

01.1023

UMBICUT – Nabelschnur Klemmschere

ESV

VE à 10 Stück